

MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO

CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 5F 6F 7F

ESTÉRIL. Esterilizado por gás de óxido de etileno. Apirogênico. Radiopaco. Apenas para uma única utilização. Não reesterilizar.

I. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O cateter guia Cordis possui um lúmen grande não afilado que permite aplicar injeções de meio de contraste e monitorizar a tensão, e facilita a passagem intravascular de dispositivos de intervenção.

II. INDICAÇÕES

O cateter guia foi concebido para introdução intravascular de dispositivos de intervenção/diagnóstico no sistema vascular coronário ou periférico.

III. CONTRA INDICAÇÕES

Nenhumas conhecidas para cateteres guia.

IV. ADVERTÊNCIAS

Risco de utilização: Este produto foi concebido e destina-se a uma única utilização. Não foi concebido para ser submetido a reprocessamento e reesterilização depois da utilização inicial. A reutilização deste produto, incluindo após o reprocessamento e/ou a reesterilização, pode originar uma perda da integridade estrutural, o que poderá conduzir à incapacidade do dispositivo para apresentar o desempenho planeado e pode originar uma perda de rotulagem/informação de utilização críticas, podendo todos estes fatores constituir um risco potencial para a segurança do doente.

Não utilize com meios de contraste Ethiodol ou Lipiodol* ou com quaisquer outros meios de contraste que incorporem os mesmos componentes destes agentes.

V. PRECAUÇÕES

- Armazene num local fresco, escuro e seco.
- Não utilize embalagens abertas ou danificadas.
- Utilize antes da data indicada em "Prazo de validade".
- Não volte a esterilizar.
- Não exponha a solventes orgânicos.
- Inspeccione o cateter guia antes de o utilizar, para se certificar de que o tamanho, a forma e o estado são apropriados para o procedimento.

- Se encontrar uma grande resistência durante a manipulação do cateter, interrompa o procedimento e determine a causa desta resistência antes de prosseguir. Se não puder determinar a causa da resistência, retire o cateter.
- Uma torção excessiva do cateter se este estiver retorcido pode causar danos que poderão resultar numa separação do corpo do cateter. Se o corpo do cateter ficar extremamente retorcido, retire todo o sistema (cateter guia, fio guia e bainha introdutora do cateter).
- O avanço, a manipulação e a remoção do cateter guia deverão ser sempre efetuados sob observação fluoroscópica.
- Deve ter-se extremo cuidado para evitar danos no sistema vascular através do qual o cateter guia passa. O cateter guia poderá obstruir vasos menores. Deve ter-se cuidado para evitar uma obstrução completa do fluxo sanguíneo.
- Os cateteres guia com lúmen interno maior requerem a aplicação de menos força no êmbolo da seringa durante a injeção.

VI. COMPLICAÇÕES

Os procedimentos que requerem introdução percutânea de um cateter não devem ser efetuados por médicos não familiarizados com as possíveis complicações. Estas complicações poderão ocorrer em qualquer ocasião durante ou após o procedimento.

As complicações possíveis incluem, mas não se limitam a:

- Embolia gasosa
- Hematoma no local da punção
- Infecção
- Perfuração do coração
- Lesão, dissecação ou perfuração vascular
- Vasospasmo
- Isquemia
- Hemorragia
- Arritmia
- Reação a meios de contraste
- Morte

VII. PROCEDIMENTO RECOMENDADO

1. Retire o cateter guia da respectiva embalagem.
2. Inspeccione o cateter guia após a remoção da embalagem, para verificar se este não tem nenhuns danos.

Advertência: Não utilize um cateter guia que tenha sido danificado de alguma forma. Se detectar danos, substitua-o por um cateter guia em bom estado.

3. Antes da utilização, irrigue o lúmen do cateter guia com uma solução salina heparinizada.
 4. Introduza o cateter guia no sistema vascular através da bainha introdutora de cateter e/ou sobre um fio guia, utilizando uma técnica de introdução percutânea à sua escolha.
 5. Instale um sistema de irrigação contínuo de solução salina heparinizada através da conexão lateral de uma válvula hemostática acoplada ao conector do cateter guia.
- Nota:** Recomendamos que mantenha uma irrigação contínua de solução salina heparinizada entre o cateter guia e qualquer dispositivo intraluminal passado através dele.
6. Sob observação fluoroscópica, faça avançar o cateter guia sobre o fio guia ou sobre o introdutor até atingir a posição desejada.
 7. Remova o fio guia ou o introdutor antes de introduzir outros dispositivos intravasculares ou antes da infusão de agentes de contraste.

RENÚNCIA DA GARANTIA E LIMITAÇÃO DE RECURSO LEGAL












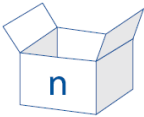
NÃO EXISTE QUALQUER TIPO DE GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZIDADE OU APTIDÃO PARA UM DETERMINADO FIM, PARA O(S) PRODUTO(S) CORDIS DESCRITO(S) NESTA PUBLICAÇÃO. A CORDIS NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM NENHUMAS CIRCUNSTÂNCIAS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PARA ALÉM DO EXPRESSAMENTE INDICADO NA LEI ESPECÍFICA. NENHUM INDIVÍDUO TEM A AUTORIDADE PARA OBRIGAR A CORDIS A QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, EXCEPTO CONFORME ESPECIFICAMENTE AQUI EXPRESSO.




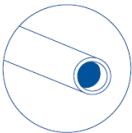



As descrições ou especificações nas publicações impressas da Cordis, incluindo a presente, destinam-se apenas a descrever o produto à data da sua fabricação e não constituem qualquer tipo de garantia expressa.

A Cordis Corporation não será responsável por quaisquer danos diretos, incidentais ou consequenciais resultantes do fato de o mesmo cateter ter sido utilizado mais do que uma vez.

* Ethiodol e Lipiodol são marcas comerciais da Guerbet S.A.

Símbolos dos rótulos e embalagem

	Fabricante
	Esterilizado por óxido de etileno
	Não re-esterilizar
	Produto de uso único – PROIBIDO REPROCESSAR
	Número de catálogo
	Número de lote
	Prazo de validade
	Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
	Manter afastado da luz solar
	Manter seco
	Apirogenico
	n unidades por caixa

	Cuidado
	ATENÇÃO: A lei federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou sob prescrição médica
	Consultar as instruções de uso
	Extremidade aberta, sem orifícios laterais
	Extremidade aberta com orifícios laterais
	Extremidade fechada com orifícios laterais
	Cateter com orifícios laterais

Registro ANVISA nº 81576620014

Produto de Uso único. PROIBIDO REPROCESSAR.

Esterilizado por óxido de etileno.

Fabricante: Cordis Corporation

14201 North West 60th Avenue
Miami Lakes, Florida – 33014 – Estados Unidos da América

Detentor do Registro:

CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA.
Rua Ponta Porã, nº 371, Vila Ipojuca
São Paulo – CEP 05058-000
CNPJ: 27.548.227/0001-22

Observação: Este modelo de instrução de uso é aplicado aos seguintes produtos:

Modelo	Descrição
6700560L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB4 LBT/100CM
67011100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AR1/SH/100CM
77809100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR4 ST/SH/100CM
6700400L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL2/LBT/100CM
67014300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBA3.5/SH/100CM
67000800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL5/100CM
77808500	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/RCB/100CM
67021055	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/RDC1 SMALL/55CM
77800300	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL3.5/SH/100CM
6700820E	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR4 ECOPAC/100CM
67016400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JFL-ST FAJADET/100CM
5560600L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/XB LAD3.5 LBT/100CM
67006300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB LAD4/SH/100CM
77800700	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4.5/SH/100CM
77800800	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL5/100CM
77818000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/LCB/100CM
6701100L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AR1 LBT/100CM
67017400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/BARBEAU/100CM
67004000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL2/100CM
67008255	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR4/55CM
77805500	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XB3.5/SH/100CM
67007600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBC4.5/100CM
77819100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/IM/SH/100CM
77808400	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR5/100CM
6700540E	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB3.5 ECOPAC/100CM
67013100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/3 DRC/SH/100CM
67007700	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBC4.5/SH/100CM
5561680L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JFR LBT FAJADET/100CM
77819190	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/IM/SH/90CM
5560560L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/XB4 LBT/100CM
5561740L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/LBT BARBEAU/100CM
6702780L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/H-STK LBT/100CM
77805900	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XB4.5/SH/100CM
67012600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB RCA/100CM
7780020E	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL3.5 ECOPAC/100CM
77804800	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL2 ST/100CM
77827900	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/H-STICK/SH/100CM
67027890	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/HS/90CM
77808100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR3.5/SH/100CM
67007500	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBC 4/SH/100CM
67004400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL1 ST/100CM
5562780L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/H-STICK LBT/100CM
67002600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JCL3.5/100CM
7780360E	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL1 ECOPAC/100CM
67000300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL3.5/SH/100CM
SM7331	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/AL1 LBT/100CM
67027855	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/H-STICK/55CM
67012200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBR1/100CM
67000490	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL4/90CM

77808300	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR4/SH/100CM
67002800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JCL4/100CM
67000600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL4.5/100CM
77800600	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4.5/100CM
67008400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR5/100CM
67012700	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB RCA/SH/100CM
77800490	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4/90CM
67008290	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR4/90CM
77805800	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XB4.5/100CM
67027090	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/MPA-1/90CM
67018100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/LCB/SH/100CM
67006600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBLAD3/100CM
77811000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AR1/100CM
77801300	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL3.5 ST/SH/100CM
77821690	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/VBL/90CM
67027800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/H-STICK/100CM
77804300	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL3/SH/100CM
77801000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL6/100CM
77806400	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XBLAD4.5/100CM
77818200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/RCB/100CM
77805700	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XB4/SH/100CM
77806100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XBLAD3.5/SH/100CM
67007400	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.070/XBC4/100CM
67028090	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/STR/90CM
67007000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBC3/100CM
67016600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JFL-LT FAJADET/100CM
77827055	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/MPA1/55CM
77822455	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.070/CONTRA2/55CM
5560820L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JR4 LBT/100CM
67003400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL.75/100CM
67012100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/NR4/SH/100CM
SM7717	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/RBL4/100CM
6702700L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/MPA-1 LBT/100CM
67003700	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL1/SH/100CM
67001600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL4.5 ST/100CM
67005600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB4/100CM
67012300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBR 1/SH/100CM
77804400	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL1 ST/100CM
67005500	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB3.5/SH/100CM
77827890	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/H-STICK/90CM
67011300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AR2/SH/100CM
67001400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL4 ST/100CM
67027000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/MPA1/100CM
SM7328	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/XB3/100CM
67027055	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/MPA1/55CM
77805200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XB3/100CM
67018800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/EGB/100CM
77800100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL3/SH/100CM
67012000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/NR4/100CM
77806300	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XBLAD4/SH/100CM
67005800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB4.5/100CM
67007300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBC3.5/SH/100CM

77818300	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/RCB/SH/100CM
67019090	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/IM/90CM
67008000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR3.5/100CM
7780140E	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4 ST ECOPAC/100CM
67001000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL6/100CM
77803400	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL.75/100CM
77819000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/IM/100CM
6700820L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR4 LBT/100CM
SM7329	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JL4.5/100CM
67028055	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/STR/55CM
67004100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL2/SH/100CM
77819090	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/IM/90CM
67000500	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL4/SH/100CM
77800200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL3.5/100CM
77804000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL2/100CM
67021890	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/CBL MOD BURKE/90CM
5562700L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/MPA1 LBT/100CM
77806200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XBLAD4/100CM
7780040E	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4 ECOPAC/100CM
67027200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/MPB-1/100CM
67006700	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBLAD3/SH/100CM
67027900	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/H-STICK/SH/100CM
67005400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB3.5/100CM
67018000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/LCB/100CM
67001200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL3.5 ST/100CM
SM7330	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JR5/100CM
67018090	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/LCB/90CM
67009000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR4 ST/100CM
67000400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL4/100CM
67004800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL2 ST/100CM
67021455	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JCV/55CM
67003600	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL1/100CM
SM7718	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/RBL5/100CM
77803700	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL1/SH/100CM
77801500	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4 ST/SH/100CM
67006000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBLAD3.5/100CM
6700540L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB3.5 LBT/100CM
67018200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/RCB/100CM
67017000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JFR-STE FAJADET/100CM
77801200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL3.5 ST/100CM
77805600	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XB4/100CM
67012500	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBR2/SH/100CM
67009800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JCR4/100CM
67018300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/RCB/SH/100CM
5560020L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JL3.5 LBT/100CM
77804500	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL1 ST/SH/100CM
77827100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/MPA-1/SH/100CM
67027100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/MPA-1/SH/100CM
67005900	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB4.5/SH/100CM
67006200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBLAD4/100CM
77801600	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4.5 ST/100CM
67019000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/IM/100CM

77827000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/MPA-1/100CM
67006500	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBLAD4.5/SH/100CM
5560400L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/AL2 LBT/100CM
SM7465	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB2.5/100CM
SM7333	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/AR1/100CM
67016800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JFR FAJADET/100CM
77805400	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XB3.5/100CM
67005700	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB4/SH/100CM
67005490	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/0.70/XB3.5/90CM
5561620L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JFL FAJADET/100CM
77806000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XBLAD3.5/100CM
67019200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/IM VB-1/100CM
67016200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JFL FAJADET/100CM
67021255	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/RDC LARGE/55CM
77801800	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL5/ ST/100CM
77808200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR4/100CM
77806500	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XBLAD4.5/SH/100CM
77821255	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/RDC/55CM
67008200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR4/100CM
77821455	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JCV/55CM
67018290	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/RCB/90CM
77804100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL2/SH/100CM
67009900	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JCR4/SH/100CM
77803800	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL1.5/100CM
5561720L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/RB LBT/100CM
77802200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL6 MOD ST/100CM
7780820E	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR4 ECOPAC/100CM
67019300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/IM VB-1/SH/100CM
67004200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL3/100CM
5560080L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JL5 LBT/100CM
77821055	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/RDC1/55CM
67005300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB3/SH/100CM
67006400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBLAD4.5/100CM
77811200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AR2/100CM
77818100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/LCB/SH/100CM
67008300	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR4/SH/100CM
SM7501	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/LIMA 90°/90CM
67012400	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBR 2/100CM
67008100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JR3.5/SH/100CM
77808290	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR4/90CM
77827200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/MPB-1/100CM
67011200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AR2/100CM
77803900	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL1.5/SH/100CM
77827090	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/MPA-1/90CM
67003800	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL1.5/100CM
77800000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL3/100CM
77800500	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4/SH/100CM
67000200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL3.5/100CM
6700040L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL4 LBT/100CM
77800900	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL5/SH/100CM
67002900	Cateter Guia VISTA BRITE 6G/.070/JCL4/SH/100CM
6701120L	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AR2 LBT/100CM

77827800	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/H-STICK/100CM
77805300	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/XB3/SH/100CM
5560540L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/XB3.5 LBT/100CM
67013000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/3DRC/100CM
67017200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/RB/100CM
77811100	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AR1/SH/100CM
67011000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AR1/100CM
77800400	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4/100CM
77808390	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR4/SH/90CM
6700040E	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL4 ECOPAC/100CM
77809000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR4 ST/100CM
67006100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBLAD3.5/SH/100CM
67007200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBC3.5/100CM
5560040L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JL4 LBT/100CM
67000000	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JL3/100CM
77822255	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/CONTRA1/55CM
77811300	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AR2/SH/100CM
67007100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XBC3/SH/100CM
67002700	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/JCL3.5/SH/100CM
77803600	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL1/100CM
SM7636	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/BBL/100CM
67005200	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/XB3/100CM
67019100	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/IM/SH/100CM
77808000	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JR3.5/100CM
77804200	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/AL3/100CM
77801400	Cateter Guia VISTA BRITE 7F/.078/JL4 ST/100CM
67019055	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/IM/55CM
5560800L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/JR3.5 LBT/100CM
67003500	Cateter Guia VISTA BRITE 6F/.070/AL.75/SH/100CM
5561900L	Cateter Guia VISTA BRITE 5F/.056/IM LBT/100CM