



RAILWAY™

SISTEMA DE ACESSO RADIAL SEM INTRODUTOR

O versátil sistema para reduzir o acesso em até 2F¹

- **O menor perfil de acesso introdutor radial do mesmo tamanho** – intervenção completamente sem introdutor para angioplastias
- **Aumente o Tamanho Quando Necessário** – troque para o cateter guia de intervenção, sem aumentar o tamanho da punção após a angiografia.
- **Facilita a Progressão** – progrida através da anatomia radial até a Subclávia

* CUIDADO: Não avance o dilatador além da artéria subclávia. Avanços adicionais podem causar complicações vasculares (consulte as Instruções de Uso).

RADIAL **360**

RAILWAY™
SISTEMA DE ACESSO SEM INTRODUTOR

Cordis™

RAILWAY™

SISTEMA DE ACESSO RADIAL SEM INTRODUTOR

O SISTEMA DE ACESSO RADIAL SEM INTRODUTOR RAILWAY™ FOI DESENVOLVIDO PARA TRANSFORMAR O SEU CATETER GUIA PREFERIDO EM UM SISTEMA DE CATETER SEM INTRODUTOR.



PERFIL DE ACESSO MENOR DO QUE QUALQUER INTRODUTOR RADIAL:

- Reduza o risco de espasmo e oclusão²
- Trate lesões mais complexas via acesso radial



COMPATIBILIDADE:

- Compatível com centenas de cateteres guia
- Disponível nos tamanhos 5F, 6F e 7F



VERSATILIDADE:

- Acesso com abordagem puramente sem introdutor para as intervenções
- Aumente o tamanho (em French) do cateter guia após a angiografia com introdutor
- Progrida pela anatomia radial com ou sem introdutor

RAILWAY™
COM CATETER GUIA
7F = DIÂMETRO
EXTERNO DE UM
INTRODUTOR
RADIAL 5F

O SISTEMA DE ACESSO RADIAL SEM INTRODUTOR RAILWAY INCLUI O SEGUINTE:

- Dilatador de vaso compatível com fio guia de .021"
- Dilatador de vaso compatível com fio guia de .035"
- Mini fio guia de .021", cateter IV e agulha sem revestimento

CÓDIGO PRODUTO	MINI FIO GUIA DE ACESSO	AGULHAS INCLUSAS	DILATADOR DE VASO	COMPATIBILIDADE DE CATETER GUIA RECOMENDADA (E DIÂMETRO INTERNO)	COMPATIBILIDADE DO FIO GUIA (2 DILATADORES)	DIMENSÕES DO DIÂMETRO EXTERNO DO DILATADOR	
RW5ADTH	NITINOL HIDROFÍLICO	CATETER IV E AGULHA	5F, CINZA	5F CORDIS ADROIT* (0,058")	0,021" E 0,035"	0,057" / 1,45mm	
RW5ADTB	AÇO INOXIDÁVEL SEM REVESTIMENTO	CATETER IV E AGULHAS SEM REVESTIMENTO		5F CORDIS VISTA BRITE TIP* (0,056")	0,021" E 0,035"	0,056" / 1,41mm	
RW5VBTH	NITINOL HIDROFÍLICO	CATETER IV E AGULHA		6F, VERDE	6F CORDIS ADROIT* (0,072")	0,021" E 0,035"	0,071" / 1,80mm
RW5VBTB	AÇO INOXIDÁVEL SEM REVESTIMENTO	CATETER IV E AGULHAS SEM REVESTIMENTO			6F CORDIS VISTA BRITE TIP* (0,070")	0,021" E 0,035"	0,070" / 1,77mm
RW6ADTH	NITINOL HIDROFÍLICO	CATETER IV E AGULHA	7F, LARANJA		7F CORDIS VISTA BRITE TIP* (0,078")	0,021" E 0,035"	0,078" / 1,97mm
RW6ADTB	AÇO INOXIDÁVEL SEM REVESTIMENTO	CATETER IV E AGULHAS SEM REVESTIMENTO					
RW6VBTH	NITINOL HIDROFÍLICO	CATETER IV E AGULHA					
RW6VBTB	AÇO INOXIDÁVEL SEM REVESTIMENTO	CATETER IV E AGULHAS SEM REVESTIMENTO					
RW7VBTH	NITINOL HIDROFÍLICO	CATETER IV E AGULHA					
RW7VBTB	AÇO INOXIDÁVEL SEM REVESTIMENTO	CATETER IV E AGULHAS SEM REVESTIMENTO					

Para compatibilidade com o cateter-guia: os dilatadores foram otimizados para caber nos cateteres Cordis VISTA BRITE TIP™ ou Cordis ADROIT™ e não foram otimizados dimensionalmente para compatibilidade com outros cateteres-guia.

Dados em arquivo. Em comparação com bainhas radiais convencionais. A redução do perfil é de 1,2F em comparação com o Terumo Glidesheath Slender.

1. O risco de lesão vascular, espasmo e oclusão é reduzido com dispositivos de perfil inferior. Saurabh Sanon e Rajiv Gulati, "Slender Approach and Sheathless Technique", *Interventional Cardiology/Clin* 4 (2015) 161-166

2. "Melhores práticas para abordagem transradial em angiografia e intervenção diagnósticas" por O. Bertrand e S. Rao 2015.

Somente para profissionais de saúde. Informação importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis. Reg. ANVISA RAILWAY Mini Fio Guia Aço Inoxidável nº 81576629013 e Reg. ANVISA RAILWAY Mini Fio Guia Hidrofílico nº 81576629011.

CORDIS, Cordis LOGO e RAILWAY, VISTA BRITE TIP, ADROIT e RADIAL 360 são marcas comerciais da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou outros países.

©2023 Cordis. Todos os Direitos Reservados. 100550599-4 04/2024

