

VISTA BRITE TIPTM IG


Cateter Guia Valvulado com Dilatador Vaso Integrado e
válvula hemostática Slix

A junção perfeita



Para Carótidas, Renais e Contralateral

VISTA BRITE TIP™ IG Cateter Guia Valvulado combina as qualidades de guia e manuseio do cateter guia VISTA BRITE TIP™ com as vantagens do introdutor AVANTI™+ em um único dispositivo

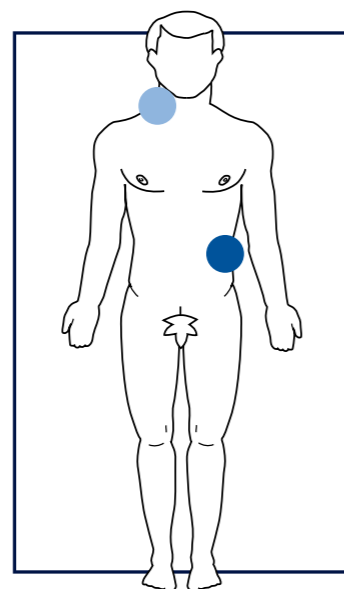

- Lúmen extragrande
- Memória de formato
- Corpo flexível
- Resistente a dobras
- Visualização de fluxo
- Fácil inserção na pele
- Mínima perda de sangue
- Controle de torque
- Ponta flexível atraumática
- Ponta radiopaca
- Revestimento interno em Teflon
- Lúmen verdadeiro
- Conforto e segurança para o paciente

Segmento 3:

Firmeza com flexibilidade... Gentileza

Excelente flexibilidade para melhor conformação a anatomia do paciente e para facilitar a navegação de dispositivos.

Segmento 4:

Estável e com manobrabilidade

Para garantir a manobrabilidade do guia enquanto a firmeza suficiente é mantida para continuar a fornecer sólido back-up.

Segmento 5:

Máxima firmeza para controle

Ótima mistura entre tipos de nylon oferece equilíbrio entre corpo firme e flexibilidade do segmento distal, resultando em excelente empurabilidade e capacidade de transmissão de torque 1:1 do hub até a ponta. O trançado em aço inoxidável minimiza o kinking.

Segmento 6:

Suave revestimento em Teflon

Para lubricidade interna e suave passagem de dispositivos.

Segmento 2:

Flexibilidade aumentada aonde é necessário

Ponta distal flexível, pré-moldada e atraumática para fácil canulação e alinhamento coaxial.

Segmento 1:

Ponta radiopaca macia

A ponta é desenhada para engajamento atraumático seguro e posicionamento

Segmento 7:


Alta manobrabilidade com mínimo refluxo

Patenteada válvula hexacúspide SLIX permite movimento sem refluxo de sangue ou entrada de ar.

Segmento 8:


Fácil introdução de líquidos

Porta lateral com colar de sutura rotável permite fácil injeção de contraste.

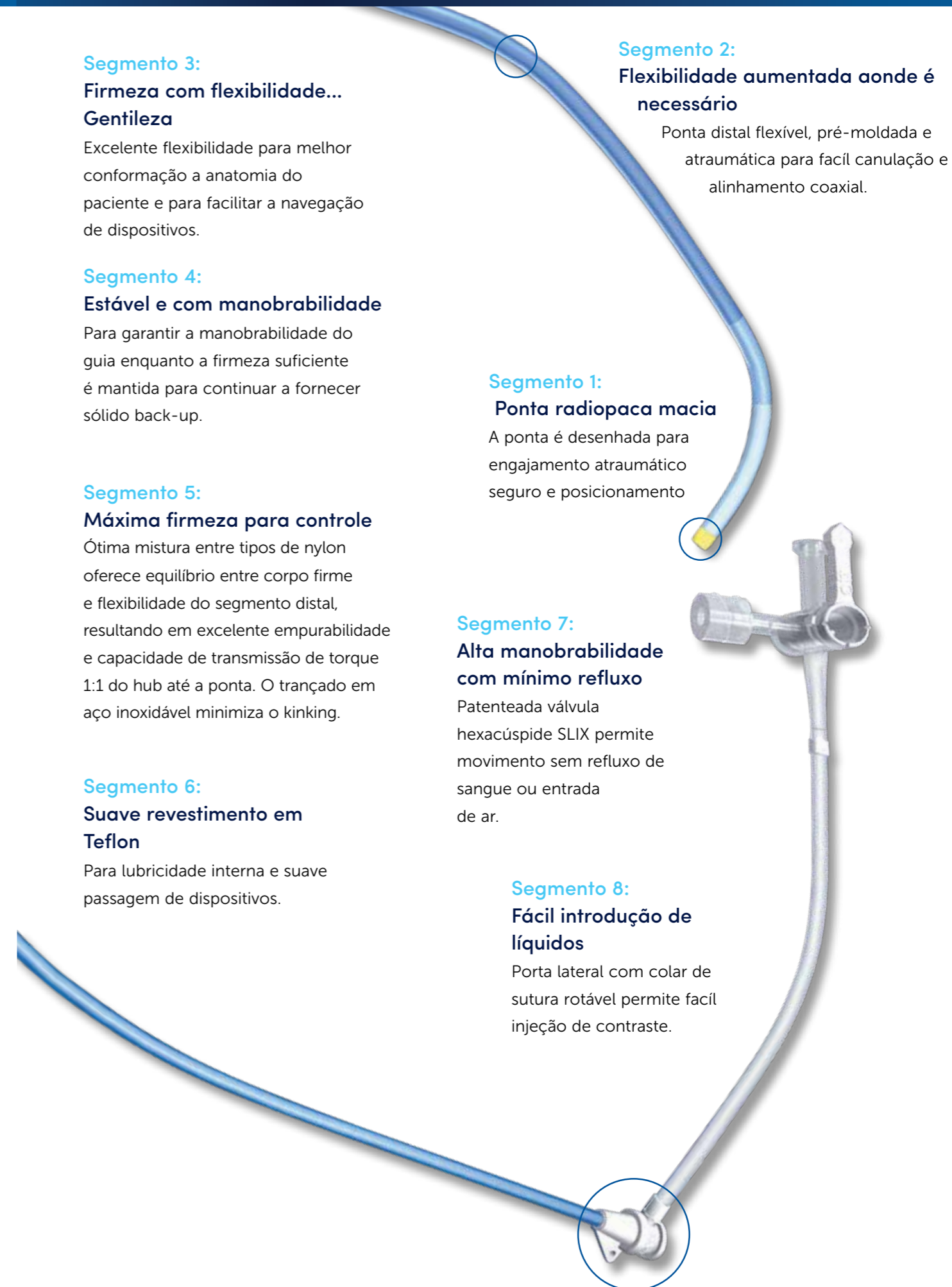

Comparação entre Tamanhos da Punção

O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP™ IG permite um tamanho menor de punção em comparação com a combinação introdutor e cateter guia. Esta pequena redução no tamanho da punção pode ser traduzida em menos tempo de compressão para um procedimento mais rápido, menor risco de trombose e maior eficiência do serviço, aumentando o conforto do paciente. Além disso, o cateter guia valvulado VISTA BRITE TIP™ IG incorpora todas as vantagens de um cateter guia VISTA BRITE TIP™, que proporciona estabilidade e firmeza com suporte e torqueabilidade ideais para contribuir com a segurança do procedimento.

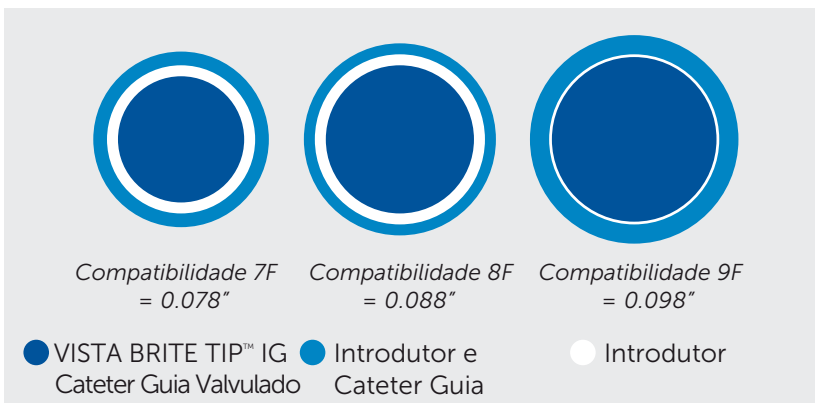

O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP™ IG possui a patenteada válvula hemostática SLIX com desenho espiral de seis cortes que permite o livre movimento do cateter com mínimo refluxo de sangue.

Código do Produto	Formato da Curva	Comprimento (cm)	Diâmetro Externo (F)	Diâmetro Interno (Pol)	Desenho da Curva
403-7553A	Renal II (adulto)	55	7	0.078"	
403-7553R	Renal I (pequena)	55	7	0.078"	
403-7553H	Hockey stick	55	7	0.078"	
403-7553C	Contralateral	55	7	0.078"	
403-7553M	Multipurpose	55	7	0.078"	
403-8553A	Renal II (adulto)	55	8	0.088"	
403-8553R	Renal I (pequena)	55	8	0.088"	
403-8553H	Hockey stick	55	8	0.088"	
403-8553C	Contralateral	55	8	0.088"	
403-8553M	Multipurpose	55	8	0.088"	
403-8553S	Reto (STR)	55	8	0.088"	
403-8953M	Multipurpose	95	8	0.088"	
403-8953S	Reto (STR)	95	8	0.088"	
403-8953B	Burke Cerebral Modificada (CBL)	95	8	0.088"	
403-9953M	Multipurpose	95	9	0.098"	

* Códigos Importados Sob Encomenda MTO

Embalagem

O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP™ IG é etiquetado (classificado) da mesma maneira que o cateter guia VISTA BRITE TIP™ pelo seu diâmetro externo em French e diâmetro interno em Polegada. Esta disponível em vários formatos de ponta. Um dilatador de vaso flexível com ponta radiopaca acompanha cada embalagem.

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis.

CORDIS, Cordis LOGO, VISTA BRITE TIP, e AVANTI são marcas comerciais registradas da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Reto no 81576629006, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG MPA no 81576629010, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Hockey Stick no 81576629007, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Renais no 81576629008, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Contralateral no 81576629009, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Burke Cerebral no 81576629005.

©2024 Cordis. Todos os direitos reservados. 100565166-4 06/2024