

사용방법

1. 사용 전 주의사항

- 1) 사용 전 포장과 제품의 멸균상태, 유효기간 등을 점검한다.
- 2) 외관상 결함이 없는지, 포장이 뜯기거나 손상된 곳이 없는지 확인한다.

2. 사용방법

선택한 혈관 삽입 기법을 사용하여 혈관에 카테터를 삽입한다. Cordis 혈관조영술용 카테터와 함께 PTFE가 코팅된 가이드와이어를 사용하는 것을 권장한다.

3. 사용 후 관리방법

본 제품은 일회용임으로 재사용하지 않고 폐기한다.

본 문서는 열람용으로서, 무단 복제와 도용을 금지함

사용시 주의사항

1. 경고

- 1) 재사용하면 안 된다. 한 번 시술한 다음에는 폐기한다. 다시 사용하거나 세척하면 구조적 무결성 또는 기능이 손상될 수 있다. 모든 부품은 생물학적 물질에 노출된 후에는 세척하기가 매우 어려우며, 이를 다시 사용할 경우 환자에게 부작용을 일으킬 수 있다. Cordis Corporation은 제품 재사용으로 인한 직접적, 부수적 또는 파생적 손해에 대하여 책임을 지지 않는다.
- 2) 유기 용매에 노출시키지 않는다.
- 3) 에티오돌(ethiodol) 혹은 리피오돌(lipiodol) 조영제, 혹은 이들 조영제가 구성 성분으로 포함된 다른 조영제와 함께 사용하지 않는다.
- 4) 라벨이나 허브에 프린트된 최대압력을 초과해서는 안 된다.

2. 사용시 주의사항

- 1) 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.
- 2) 포장에 개봉되어 있거나 손상된 경우에는 사용하지 않는다.
- 3) "사용기한"이 지난 경우에는 카테터를 사용하지 않는다.
- 4) 재멸균하지 않는다.
- 5) 54°C (130°F) 이상의 온도에 노출시키면 카테터가 손상될 수 있다.
- 6) 패키지에서 카테터를 꺼낼 때, 카테터 팁을 보호하기 위해서는 허브를 잡고 카테터를 조심스럽게 꺼낸다. 급히 제거시키거나 갑자기 잡아당기면 팁을 손상시킬 수 있다.
- 7) 사용하기 전, 해파린화된 식염수 또는 유사한 등장성 용액을 사용해서 모든 장비를 씻어낸다.
- 8) 혈액의 침입을 최소화하기 위해서, 카테터를 해파린화된 식염수 또는 조영제로 채워둔다. 2분마다 용액을 강제적으로 빨아내고 채운다.
- 9) 여러 부분이 곡선으로 이루어진 카테터에서 가이드와이어를 제거할 때는 주의한다.

3. 합병증

경피카테터 시술은 가능한 합병증에 익숙하지 않는 외과의에 의해 시술되면 안된다. 합병증은 시술 중 또는 후에 언제나 발생할 수 있다. 다음과 같은 합병증이 발생할 수 있으며 이 밖의 다른 합병증도 발생할 수 있다.

공기색전증, 천자부위의 혈종, 감염, 혈관벽의 천공

저장방법 : 실온보관

본 문서는 열람용으로서, 무단 복제와 도용을 금지함