


사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 포장재에서 제품을 꺼낸다.
- 2) 포장재에서 제품을 꺼낼 때 손상이 있는지를 유심히 살펴 본다.

나. 사용방법

- 1) 본 제품(370-113 외 167건)은 0.018~0.045인치의 혈관 카테터 안내선과 함께 사용할 수 있다.
- 2) 선택한 혈관 삽입 기법을 사용하여 혈관에 카테터를 삽입합니다.
- 3) 혈관 구조에서 원하는 위치까지 카테터를 밀어 넣습니다.
- 4) 측정 : 연속된 두 표지 띠 사이의 거리 "X"mm는 라벨에 있는 값과 일치합니다.
아래 그림에 표시된 대로 거리를 측정해야 한다.

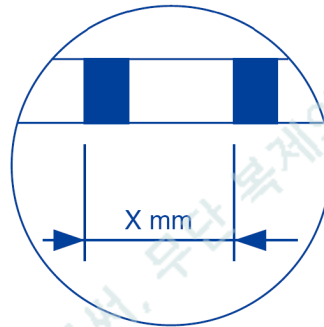

다. 사용 후 관리방법

본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다.

사용시 주의사항

가. 경고

- 1) 카테터를 사용하여 한 번 시술한 다음에는 폐기한다. 재사용하거나 세척 시 제품의 구조나 기능이 손상될 수 있습니다. 모든 부품이 생물학적 물질에 노출된 경우 완벽한 세척이 거의 불가능하며 재사용 시 환자에게 부작용을 일으킬 수도 있다.
- 2) 유기 용매에 노출시키지 않는다.
- 3) 라벨과 허브에 인쇄된 최대 정격 압력을 초과하지 않는다.

나. 주의사항

- 1) 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.
- 2) 포장이 뜯어져 있거나 손상된 경우에는 사용하지 않는다.
- 3) 포장 라벨에 있는 "사용 기한"이 지난 경우에는 카테터를 사용하지 않는다.
- 4) 재멸균하지 않는다.
- 5) 가압 멸균하지 않는다. 54°C(130°F) 이상의 온도에 노출시키면 카테터가 손상될 수 있다.
- 6) 포장에서 카테터를 꺼낼 때 팁이 손상되지 않도록 하려면 허브를 잡고 카테터를 조심스럽게 빼낸다.
- 7) 카테터가 꼬이는 것을 방지하기 위해 다음 사항을 준수해야 한다.
 - ① 돼지꼬리형 카테터는 손으로 펴지 말고 진단용 가이드와이어를 사용해서 펴야 한다.
 - ② CSI를 통해 카테터를 삽입할 때는 가이드와이어를 사용한다.
- 8) 카테터가 혈관계에 있는 동안 카테터 안에 세척액이나 조영제를 채워 두고, 전신 해파린화를 시행한다.
- 9) 여러 부분이 곡선으로 이루어진 카테터에서 가이드와이어를 제거할 때는 주의한다.

다. 합병증

발생 가능한 합병증에 대해 잘 모르는 의사가 피부를 통해 카테터를 삽입해야 하는 시술을 시도해서는 안된다. 합병증은 시술 중이나 시술 후에 언제든지 발생할 수 있다. 다음과 같은 합병증이 발생할 수 있으며 이 밖의 다른 합병증도 발생할 수 있다.

공기색전증, 바늘을 꽂은 부위의 혈종, 감염 및 혈관벽 천공 등의 합병증이 나타날 수 있으며, 이에 국한되지 않는다.

저장방법

실온 보관