

별첨 6

용법 · 용량 :

- 1) 멸균된 포장재에서 본품을 꺼낸다.
- 2) 본품의 근말단을 다른 기구의 팁에 삽입하고 허브가 보일 때까지 본품을 진입시키거나 본품의 원말단팁을 다른 기구의 가이드와이어 허브로 삽입하고 다른 기구의 팁이 보일 때까지 가이드와이어를 진입시킨다.
- 3) 본품의 회전 및 조정을 돕기 위해 본품의 근말단에 스티어링 기구를 부착할 수 있다.
- 4) 본품의 위치선정을 위해 허용된 혈관조영술을 사용한다. 그 후 시술을 계속 실시한다.
- 5) 요구되는 시술이 끝나면 본품과 사용된 다른 기구를 살며시 빼낸다.
- 6) 본품은 1회용이므로 재사용해서는 안된다.

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 배포를 금지합니다.

별첨 7

사용상의 주의사항 :

- 1) 팁에 손상이 가해질 수 있으므로 디스펜서에서 가이드와이어를 꺼내기 위해 말단 팁을 잡아당겨서는 안된다.
- 2) 사용전에 멸균된 헤파린이 첨가된 식염수 혹은 유사한 등장액으로 모든 기구를 분출시킨다.
- 3) 조작중에 강한 저항이 느껴지면 시술을 멈추고 저항의 원인을 규명한 후 시술을 실행해야 한다.
- 4) 만성적인 총폐색에서 사용해서는 안된다.
- 5) 유기용매에 노출시켜서는 안된다.

본 문서는 열람용으로만 사용 가능하며, 무단 복제와 도용을 금합니다.

저장방법

건조한 냉암소에 보관한다.